

Instrucciones para la correcta orientación de los extensores SwishTapered y SwishPlus

Alcance: los productos y números de lotes afectados figuran en la tabla que se muestra a continuación.

Descripción del producto	Número de pieza	Número(s) de lote(s)
Implante SwishPlus™	924108	97347
Implante SwishPlus™	924112	64927, 93563, 98662
Implante SwishPlus™	924116	70543
Implante SwishPlus™	924806	99749
Implante SwishPlus™	924810W	93934
Implante SwishPlus™	924812W	94204
Implante SwishPlus™	924814	103199
Implante SwishTapered™	934106	68075, 69252, 79574
Implante SwishTapered™	934112	69101, 80912
Implante SwishTapered™	934806	68076, 75219
Implante SwishTapered™	934812	68078, 68889
Implante SwishTapered™	934814	67980
Implante SwishTapered™	935712	68077

Instrucciones para una correcta orientación:

Las siguientes figuras (de la figura 1 a la figura 4) muestran vistas del montaje cuando los tornillos de cierre y los extensores SwishTapered y SwishPlus se montan en los implantes en la dirección correcta y en la incorrecta.

La figura 1 que se muestra a continuación muestra los componentes cuando el extensor se monta con el tornillo de cierre en la dirección correcta (izquierda) y en la incorrecta (derecha).

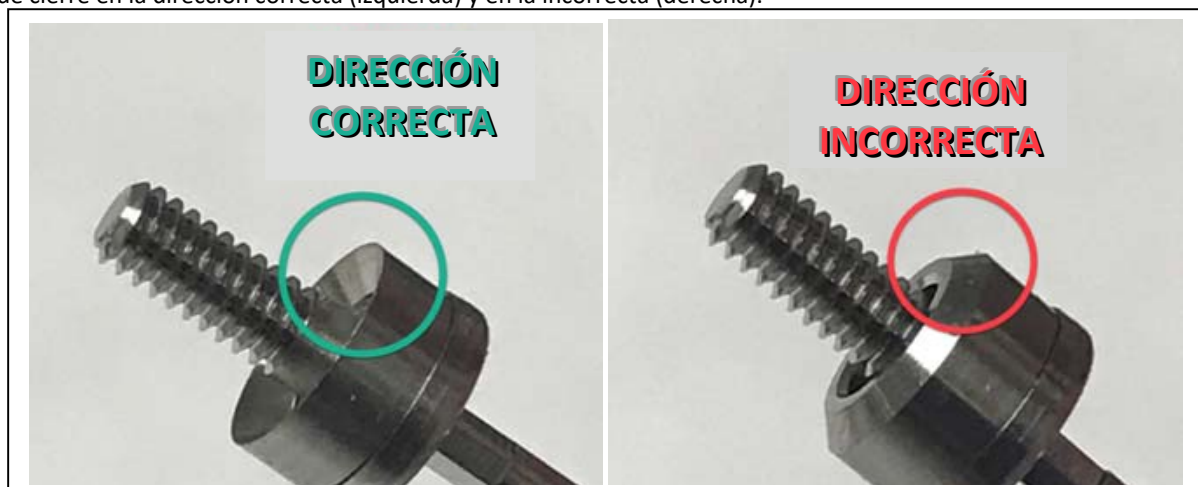


Figura 1 - Extensores de plataforma de 3,7 mm SwishTapered y SwishPlus con conjunto de tornillo de cierre

Las figuras de la 2 a la 4 muestran la orientación correcta e incorrecta del extensor para cada tamaño de plataforma SwishTapered y SwishPlus (3,7 mm, 4,8 mm y 6,5 mm). La superficie roja destaca el bisel del extensor. Nota: cuando los extensores se montan de forma incorrecta, la altura de la parte superior del tornillo de cierre desde el soporte del implante es 0,7 mm, 1,1 mm y 1,4 mm superior a lo que debería ser.

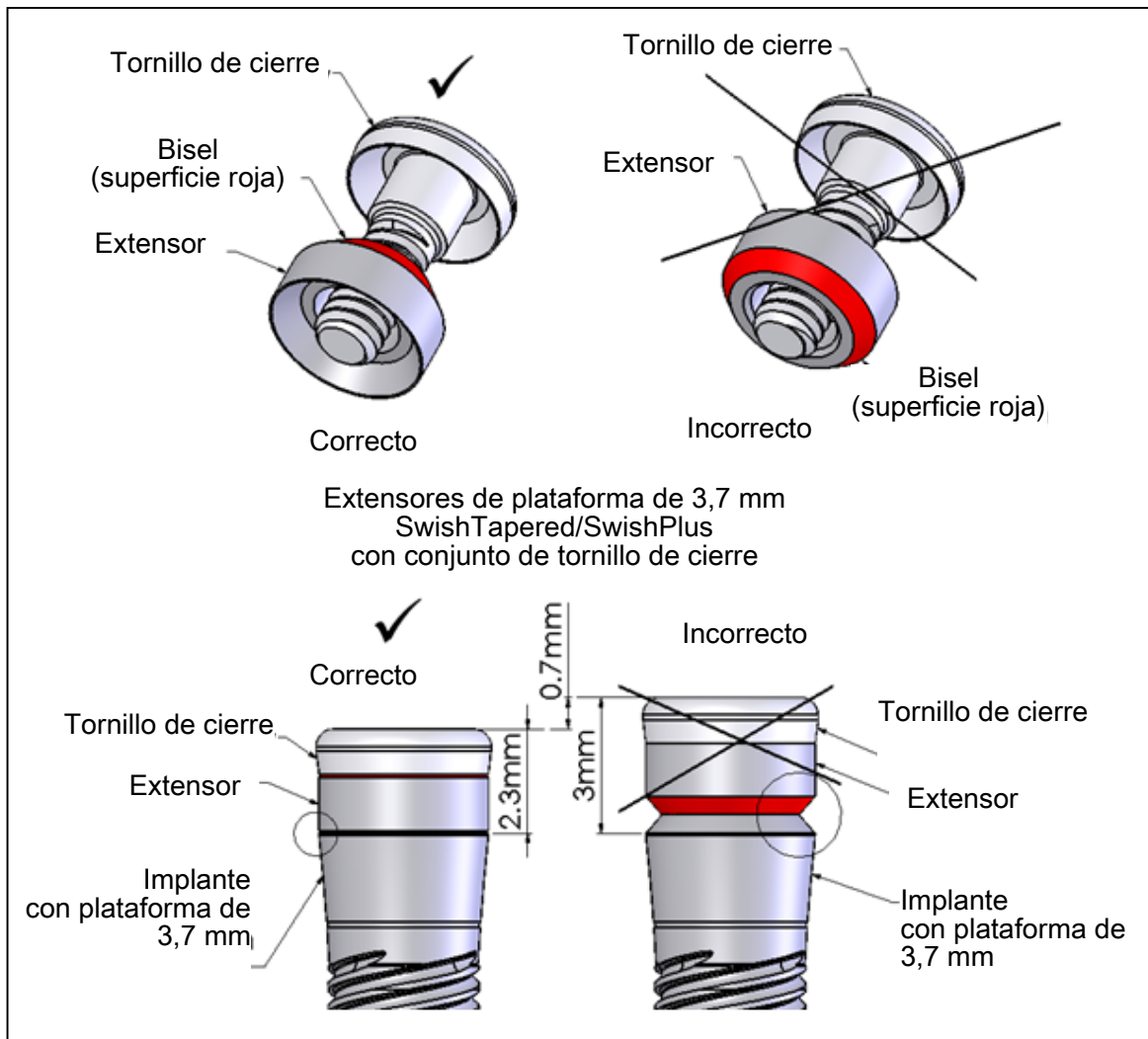


Figura 2 - Extensores de plataforma de 3,7 mm SwishTapered y SwishPlus con conjunto de tornillo de cierre

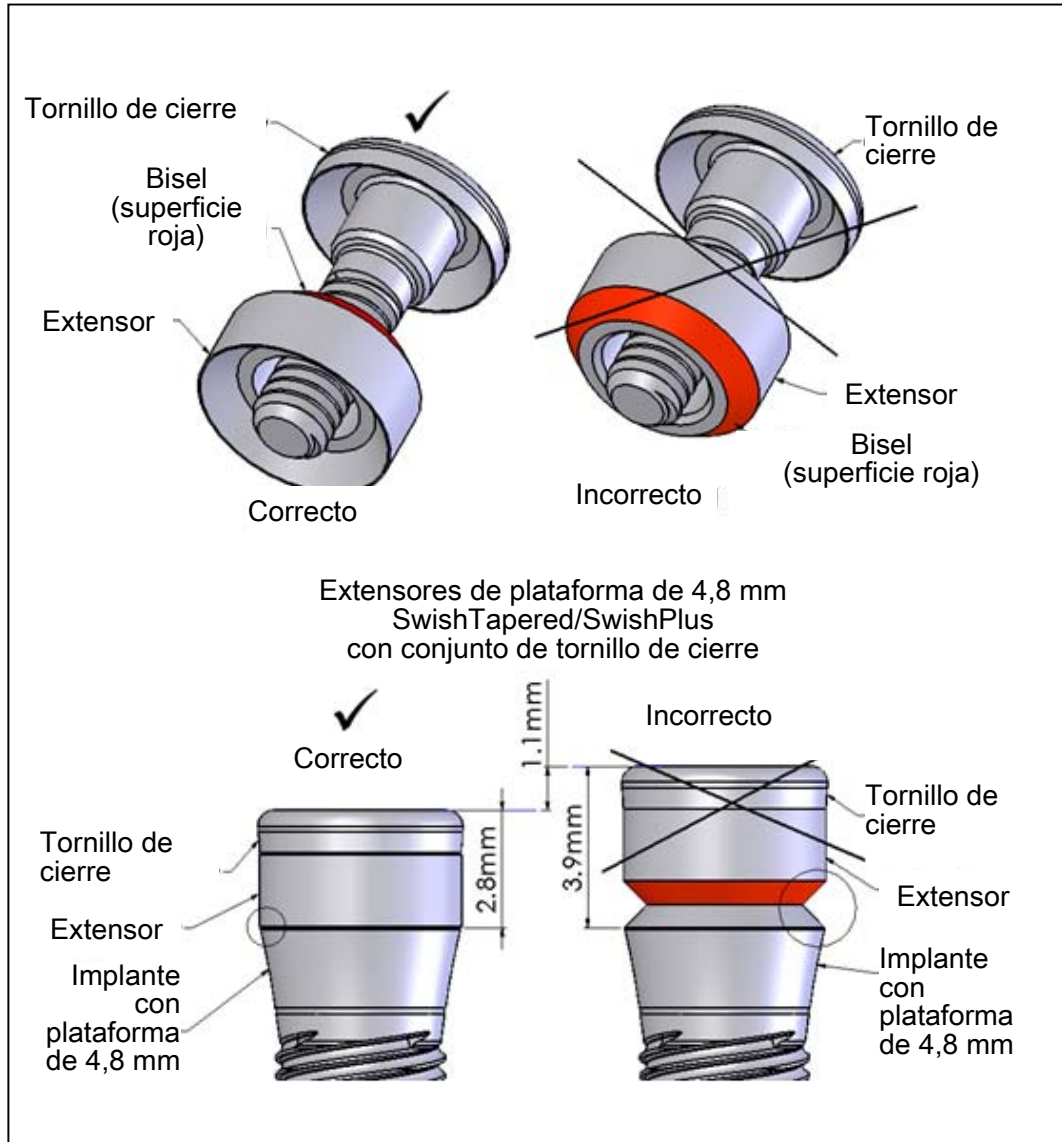


Figura 3 - Extensores de plataforma de 4,8 mm SwishTapered y SwishPlus con conjunto de tornillo de cierre

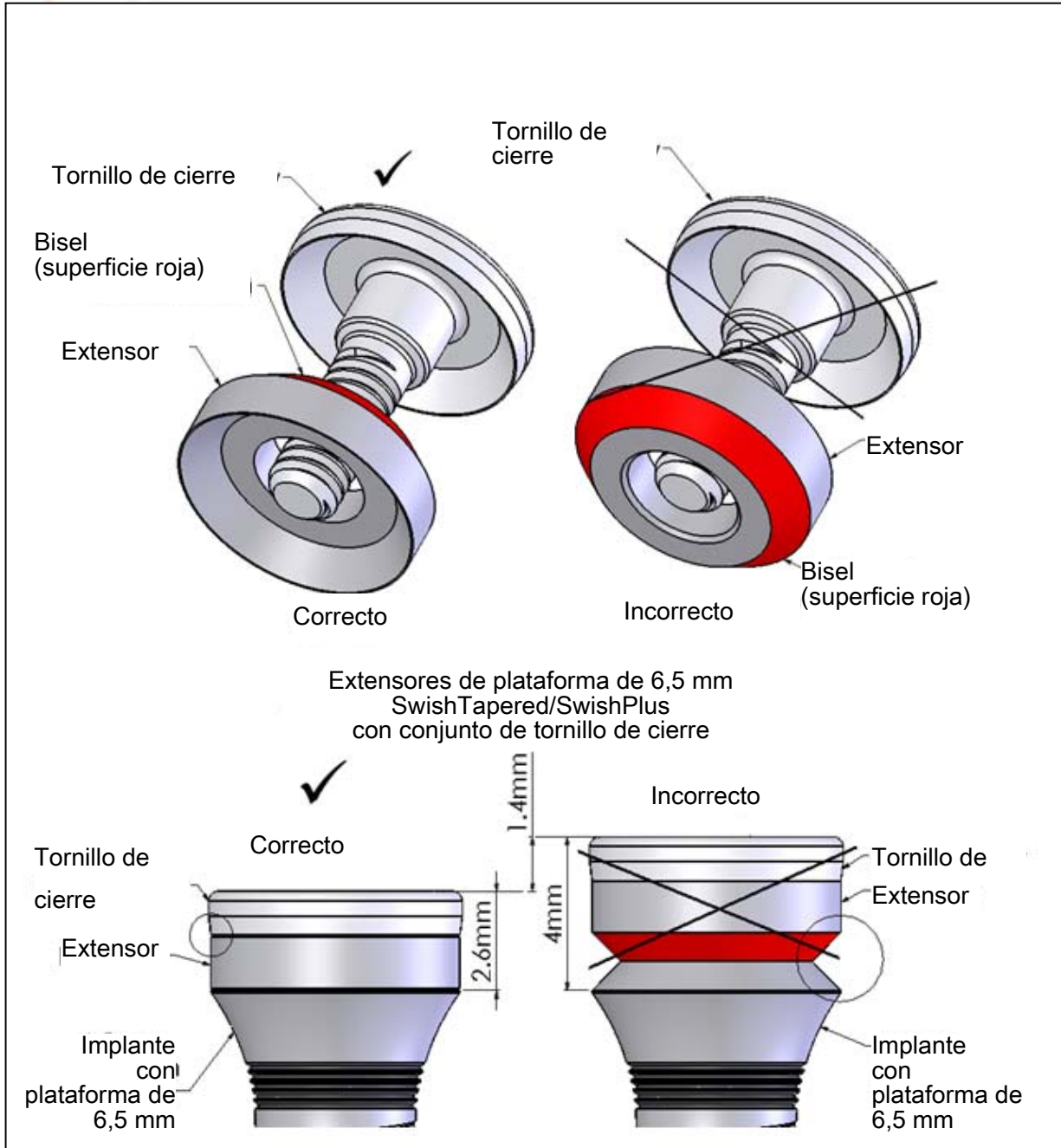


Figura 4 - Extensores de plataforma de 6,5 mm SwishTapered y SwishPlus con conjunto de tornillo de cierre